


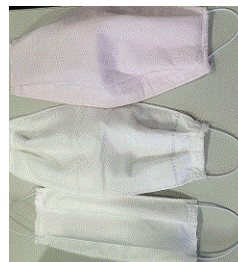

Características da Máscara

- Fabricada com Meltblown
- Fabricadas para (criança/adulto)
- Instruções Próprias para utilização
- Tipo reutilizável por lavagem
- Não permeável á passagem de água
- Capacidade de retenção >90%
- Fabricada de acordo com as normas em vigor



Categoria das Máscaras

Nível 2 : Destinadas a profissionais expostos ao contacto com o elevada população.

Nível 3 : Destinadas á sua utilização diária em espaços interiores com múltiplas pessoas.

1. Estas máscaras devem ser utilizadas como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas pelos organismos competentes, assim como o cumprimento das regras do distanciamento social. Para mais informações consultar <http://covid19.min-saude.pt>.
2. A Máscara deve ter um manuseamento correto em conformidade com as orientações da DGS.
 - Higienização das mãos antes de colocar a máscara.
 - Colocar a máscara corretamente, parte exterior para fora e a interior virada para a face.
 - Ter a certeza que a máscara está ajustada á cara cobrindo o nariz e a boca.
 - Não tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização. Caso aconteça higienizar de imediato as mãos.
 - É recomendado a utilização máxima diária por cada máscara de 4 horas. Ou assim que se encontre húmida
 - A Máscara retirada deve ser lavada antes de reutilizada.
 - Se acidentalmente a máscara ficar molhada esta deve ser trocada por outra seca.
 - A Máscara substituída só deve voltar a ser utilizada depois de lavada.
 - A remoção da máscara deve ser realizada a partir da parte de trás.
 - Não se deve tocar na parte da frente da máscara, utilizado para isso os elásticos.
 - A máscara deve ser guardada numa embalagem fechada individualmente até á sua lavagem.
 - As mãos devem ser de novo higienizadas após o manuseamento da máscara.
 - A máscara deve ser lavada inicialmente antes do seu uso inicial.
 - Estas máscaras podem ser lavadas entre 5 e 10 vezes
 - Temperatura máxima de lavagem 40 - 60º
 - As máscaras NÃO devem ser passadas a ferro.